

LMArte

LM

feel the
difference



Scolpire capolavori

LMArte



Stratificazioni estetiche - un Successo con LM-Arte

LM-Arte é una gamma di strumenti innovativi studiati per restauri estetici. Gli strumenti sono stati realizzati in collaborazione con Style Italiano, un gruppo di dentisti specializzati in odontoiatria estetica. Le forme degli strumenti LM-Arte sono state progettate specificatamente per la stratificazione del composito, mentre le punte sono realizzate super-acciaio LM-DuraGradeMax di alta qualità, antiaderente e trattato con lucidatura eccezionale.

Ciascuno strumento LM-Arte possiede un codice colore e una nomenclatura che fa riferimento alla tecnica specifica, per consentire restauri semplici efficienti e veloci.

LMArte di Style Italiano

Progettato da Walter Devoto DDS
e Angelo Putignano MD, DDS.



Style Italiano è un gruppo di studio formato da clinici e ricercatori appassionati con specializzazione nel campo dell'odontoiatria restaurativa estetica. Per maggiori informazioni, scansionare i codici QR per visitare il sito web Style Italiano e seguirli su Facebook.



Per maggiori dettagli e video clinici, scansionare il codice QR e visitare il sito www.lm-dental.com/LM-Arte





LM-Arte Applica

LMErgoSense	LM 46-49 ES
LMErgoMax	LM 46-49 XSI



LM-Arte Applica Twist

LMErgoSense	LM 464-494 ES
LMErgoMax	LM 464-494 XSI



LM-Arte Modella

LMErgoSense	LM 442-443 ES
LMErgoMax	LM 442-443 XSI



LM-Arte Condensa

LMErgoSense	LM 488-489 ES
LMErgoMax	LM 488-489 XSI



LM-Arte Misura

LMErgoSense	LM 496-497 ES
LMErgoMax	LM 496-497 XSI



LM-Arte Posterior Misura

LMErgoSense	LM 498-499 ES
LMErgoMax	LM 498-499 XSI



LM-Arte Fissura

LMErgoSense	LM 481-487 ES
LMErgoMax	LM 481-487 XSI



LM-Arte Eccesso

LMErgoSense	LM 307-308 ES
LMErgoMax	LM 307-308 XSI

Scelta delle impugnature:

LMErgoSense



Il diametro più grande e il design ottimale forniscono un'impugnatura sensazionale, valutata come più ergonomica ed efficiente nei test clinici scientifici. Impugnatura intelligente grazie all'opzione per tag RFID - vedere www.dentaltracking.com. Ø 13.7 mm

LMErgoMax




Design ergonomico classico, che funziona bene in tutte le procedure cliniche e garantisce una sensibilità tattile eccellente. Ø 11.5 mm

LM-Arte Set

LMErgoSense	LM 6840 ES
LMErgoMax	LM 6840 XSI

LM-Arte Applica
 LM-Arte Condensa
 LM-Arte Fissura
 LM-Arte Misura
 LM-Arte Eccesso
 LM-Servo 5



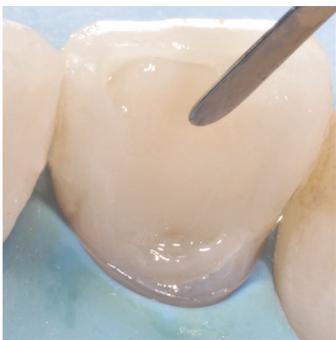

Elasticità e precisione

LM-Arte Applica

Una spatola molto sottile e flessibile, progettata per l'applicazione e la modellazione estetica del composito. L'estremità di lavoro flessibile scolpisce delicatamente e con precisione gli strati di composito, consentendo di copiare le forme naturali del dente, permette di modellare in spazi ristretti. Utilissima per dare la

forma desiderata alle superfici di composito a contatto con le matrici.



Applica con un twist

LM-Arte Applica Twist

Spatola per la modellazione del composito particolarmente sottile, flessibile e stretta. Grazie ad Applica Twist la modellazione degli spazi interprossimali e delle creste marginali diventa estremamente semplice: le sue estremità inclinate permettono di raggiungere aree difficili senza complicare la posizione di lavoro.



Modella con flessibilità

LM-Arte Modella

Spatola sottilissima di ampia superficie, ideata per la modellazione del composito. Adatta soprattutto alle superfici più estese, come le facce vestibolari degli incisivi superiori. Le ampie estremità dello strumento consentono di stendere efficacemente il composito, e la loro flessibilità, delicatezza e spessore ridotto aiutano a creare dettagli

precisi e dall'alta resa estetica. La spatola è utile anche per prelevare il composito dalla siringa.






Condensa delicatamente

LM-Arte Condensa


Un condensatore lungo dalle estremità arrotondate specificamente progettato per la modellazione del composito. La curvatura del gambo dello strumento consente l'accesso ad ogni tipo di cavità. Il condensatore ha un terminale spesso e uno sottile che possono essere utilizzati in cavità di varie dimensioni, nei settori anteriori e posteriori. Le estremità arrotondate permettono una condensazione delicata evitando che il composito vi si incolli.

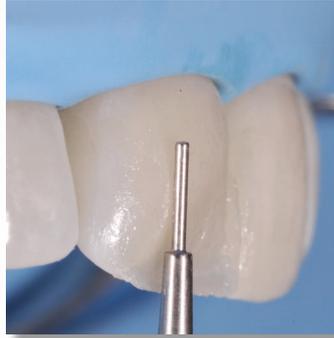

Lo spazio necessario

LM-Arte Misura

Uno strumento unico per la misurazione orizzontale e verticale dello spessore degli strati del composito nei restauri anteriori. Dopo aver posizionato lo strato di dentina, prima di polimerizzare si pone l'estremità sottile a forma conico-cilindrica a contatto con lo smalto naturale del dente. In questo modo il composito non polimerizzato che rimane al di sotto del corpo cilindrico può essere delicatamente modellato, lasciando lo spazio ottimale (da 0,5 a 0,7 mm) per l'applicazione della composito massa smalto. La punta più spessa e corta di Misura invece va posizionata sul margine della cavità preparata, in modo che il bordo della punta rimanga sullo smalto del dente. Questo aiuta a determinare il giusto spessore di composito massa smalto da applicare sul finishing line. Il risultato? Un restauro estetico finale con la giusta calibratura di masse opache e traslucide, evitando il fastidioso effetto grigio dei compositi.

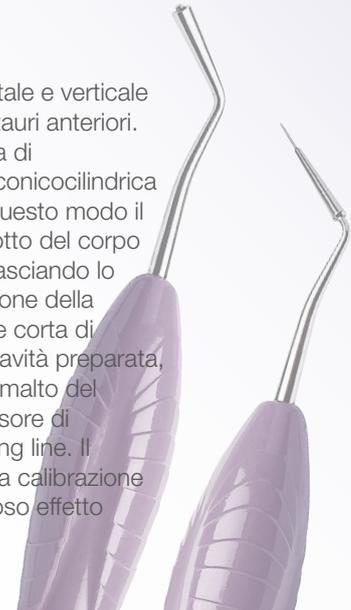

NUOVO!



Misura e modella

LM-Arte Posterior Misura

Versione posteriore del celebre strumento Misura. Progettato per la misurazione verticale dello spessore degli strati di compositi sui restauri conservativi. La punta a forchetta dello strumento consente di modellare la parete prossimale, copiando l'altezza e l'anatomia del dente vicino, in presenza di una matrice.



Scolpire capolavori

LM-Arte Fissura

Uno strumento di modellazione con punte estremamente affilate. L'estremità conica è progettata per scolpire, con un unico strumento, l'anatomia dell'areaocclusale dei denti posteriori. La sottile sonda curva è ideale per la modellazione di solchi e lobi, nonché per la stratificazione di sigillanti e l'applicazione dei supercolori. La flessibilità di Fissura permette un'esplorazione delicata ed l'identificazione di possibili eccessi di resina sulla superficie dei denti ricostruiti.



Eliminare gli eccessi

LM-Arte Eccesso

Uno strumento concepito per l'eliminazione dei residui di composito e bonding. Le speciali estremità di lavoro angolate di Eccesso sono ideali per la rimozione degli eccessi nelle zone cervicali anteriori e interprossimali dei premolari e molari. Questo strumento rigido e sottile si caratterizza per ottimali lunghezza, larghezza e spessore della lama.



Eliminare le difficoltà della retrazione gengivale con LM-Gengiva

Lo scopo del trattamento restaurativo di una lesione cervicale è quello di ottenere una perfetta sigillatura dei margini, una forte adesione e una lucidatura ottimale del composito. La retrazione gengivale meccanica nei restauri cervicali può essere traumatica se non effettuata correttamente.

Lo strumento LM-gengiva con i retrattori gengivali è utilizzato per evitare inutili lesioni della gengiva e ottenere il risultato clinico migliore. Questo metodo permette di conseguire il risultato finale desiderato: il tessuto molle non viene danneggiato e i requisiti estetici sono soddisfatti.

LM-Gengiva
kit di retrazione gengivale

LMErgoSense LM 7556K ES

LMErgoMax LM 7556K XSI

Incl. lo strumento manuale LM-Gengiva, retrattori gengivali blu (assortimento di ca. 90 pezzi, 30 pz./misura) e LM-MultiLever per rimuovere gli inserti in plastica



Retrattori gengivali

- allontanano la gengiva dai margini del restauro
- la durezza della punta in plastica permette una forte retrazione
- le punte in plastica consentono una certa flessibilità per un maggiore adattamento durante l'applicazione della pressione
- la punta agisce in modo da fornire una sigillatura ermetica tra gengiva e dente
- proteggono la gengiva
- l'interfaccia di adesione e il margine gengivale sono perfettamente visibili, in perfetto contrasto con i tessuti molli
- possibilità di personalizzazione con la fresa per l'adattamento a superfici radicolari convesse o concave
- gli adesivi non si incollano alla superficie delle punte
- non interferiscono con la polimerizzazione
- monouso

LM Dental

LM-Instruments Oy

Norrbyn rantatie 8 | FI-21600 Parainen | Finland

Tel. +358 2 4546 400

info@lm-dental.com | www.lm-dental.com

Contattate il vostro distributore!