

LMArte™



LM feel the difference



SCOLPIRE CAPOLAVORI

LMArte™



STRATIFICAZIONI ESTETICHE DI SUCCESSO

LM-Arte™ è un set di strumenti innovativo dedicato al restauro estetico, specificamente progettato per la stratificazione di materiali compositi. Ciascuno strumento è associato a un codice colore ed è denominato in base alla specifica funzione, per consentire trattamenti restaurativi semplici, efficaci e veloci. Il design leggero ed ergonomico dell'impugnatura LM, abbinato all'elevata qualità dei materiali delle punte, garantisce ottime caratteristiche di sensibilità tattile e maneggevolezza per i migliori risultati clinici.

COLLABORAZIONE CON STYLEITALIANO™

La serie di strumenti LM-Arte™ è stata sviluppata in collaborazione con Styleitaliano™, un gruppo di dentisti esperti che condividono con noi la passione per il miglioramento dell'odontoiatria.

Il movimento Styleitaliano™ nasce da una semplice idea di due amici, Walter Devoto e Angelo Putignano. I rinomati esperti nel campo dell'odontoiatria conservativa ed estetica si erano resi conto che, sebbene fossero disponibili materiali idonei a realizzare restauri diretti esteticamente belli, mancavano gli strumenti appropriati per applicarli con successo.



Styleitaliano™ è una comunità in crescita di dentisti esperti™ che contribuiscono con le proprie idee a migliorare la semplicità e la prevedibilità delle procedure odontoiatriche quotidiane. Oggi raggiunge migliaia di dentisti presenti sui canali social con video demo illustrativi, corsi, lezioni e conferenze. Visitate il sito web di Styleitaliano™ all'indirizzo www.styleitaliano.org per conoscerne la filosofia e contribuire al suo successo!



Seguite ed entrate a far parte della comunità Styleitaliano™ su Facebook e Instagram



LMArte™ Solo - DUE STRUMENTI CHE SEMPLIFICANO LA ROUTINE

NOVITÀ!

PERCHÉ?

Questi strumenti sono ideali per semplificare i casi di routine: con soli due strumenti è possibile eseguire la maggior parte dei restauri nei quadranti anteriore e posteriore garantendo la massima qualità.

CHE COSA?

Dalla modellazione all'ergonomia fino all'igiene, gli strumenti LMArte™ Solo semplificano ogni singolo aspetto della procedura riducendo il numero di strumenti necessari sul vassoio. Arricchite la vostra strumentazione per odontoiatria restaurativa con questa coppia di strumenti, ideale per la routine di restauro diretto anteriore e posteriore in composito.



Ulteriori informazioni nelle pagine seguenti e sul sito web di LM™ all'indirizzo www.lm-dental.com/LM-Arte

GAMMA DI STRUMENTI COMPLETA



LM-Arte™ Applica

LMErgoSense® LM 46-49 ES

LMErgoMax™ LM 46-49 XSI



LM-Arte™
Applica Twist

LMErgoSense® LM 464-494 ES

LMErgoMax™ LM 464-494 XSI



LM-Arte™ Modella

LMErgoSense® LM 442-443 ES

LMErgoMax™ LM 442-443 XSI



LM-Arte™ Condensa

LMErgoSense® LM 488-489 ES

LMErgoMax™ LM 488-489 XSI



LM-Arte™ Misura

LMErgoSense® LM 496-497 ES

LMErgoMax™ LM 496-497 XSI



LM-Arte™
Posterior Misura

LMErgoSense® LM 498-499 ES

LMErgoMax™ LM 498-499 XSI



LM-Arte™
Cusp Misura

LMErgoSense® LM 468-469 ES

LMErgoMax™ LM 468-469 XSI



LM-Arte™ Fissura

LMErgoSense® LM 481-487 ES

LMErgoMax™ LM 481-487 XSI



LM-Arte™ Eccesso

LMErgoSense® LM 307-308 ES

LMErgoMax™ LM 307-308 XSI



LM-Arte™
Solo Anterior

LMErgoSense® LM 431-433 ES

LMErgoMax™ LM 431-433 XSI



LM-Arte™
Solo Posterior

LMErgoSense® LM 434-438 ES

LMErgoMax™ LM 434-438 XSI

SET DI STRUMENTI SELEZIONATI PER RESTAURI UNICI



LM-Arte™ Set

Set completo di strumenti per restauri anteriori nella cassetta LM-Servo™ 5 che include:

- LM-Arte™ Eccesso
- LM-Arte™ Misura
- LM-Arte™ Fissura
- LM-Arte™ Applica
- LM-Arte™ Condensa

LMErgoSense® LM 6840 ES

LMErgoMax™ LM 6840 XSI



LM-Arte™ Posterior Set

Set completo di strumenti per restauri posteriori nella cassetta LM-Servo™ 5 che include:

- LM-Arte™ Posterior Misura
- LM-Arte™ Cusp Misura
- LM-Arte™ Fissura
- LM-Arte™ Modella
- LM-Arte™ Condensa

LMErgoSense® LM 6844 ES

LMErgoMax™ LM 6844 XSI



LM-Arte™ Complete Set

Set completo di strumenti per qualsiasi caso di restauro nella cassetta LM-Servo™ 8 che include:

- LM-Arte™ Eccesso
- LM-Arte™ Misura
- LM-Arte™ Applica
- LM-Arte™ Posterior Misura
- LM-Arte™ Cusp Misura
- LM-Arte™ Fissura
- LM-Arte™ Modella
- LM-Arte™ Condensa

LMErgoSense® LM 6848 ES

LMErgoMax™ LM 6848 XSI

Opzioni impugnatura

Tutti gli strumenti LM-Arte™ sono disponibili con due opzioni di impugnatura ergonomica:



LMErgoSense®

Il maggiore diametro e il design ottimale consentono una presa eccezionale, la cui ergonomia ed efficienza è provata dai test clinico-scientifici condotti. (Ø 13,7 mm).

L'impugnatura è disponibile con un chip RFID LM DTS™ integrato, una caratteristica esclusiva in grado di migliorare la gestione delle risorse e la sicurezza del paziente. Ulteriori informazioni sul sito www.dentaltracking.com.



LMErgoMax™

Il design ergonomico classico funziona bene in tutte le procedure cliniche e garantisce un'eccellente sensibilità tattile (Ø 11,5 mm).



NOVITÀ!



**UNO STRUMENTO PER IL VENEERING DIRETTO
LM-Arte™ Solo Anterior**

Strumento per restauri anteriori di qualità a elevato impatto estetico. Le spatole arrotondate e dritte sono progettate per la modellazione dei denti anteriori, in particolare delle superfici labiali.

Punta affilata

Modellazione di precisione
Micromodellazione
Contrassegno dei limiti
Scratching

Bordi dritti

Raschiatura

Profilo piatto

Appiattimento
Uniforme

Lama sottile

Modellazione prossimale

Profilo convesso

Modellazione a un punto
Creazione di depressioni
Creazione del profilo buccale
Creazione del profilo cervicale
Accesso alle aree difficili

Bordo angolato

Definizione
Raschiatura

Bordi affilati

Taglio, divisione, separazione
Creste marginali

Punta arrotondata

Delimitazione delicata
Contornatura cervicale



**UNO STRUMENTO PER I DENTI POSTERIORI
LM-Arte™ Solo Posterior**

Strumento per restauri posteriori in composito di alta qualità. L'estremità condensatore di amalgama è progettata per il bulk-filling e la modellazione del materiale composito. L'estremità affilata consente la contornatura dell'anatomia occlusale.

Profilo piatto

Eliminazione di eccessi di grande entità
Eliminazione di eccessi di media entità

Angolazione

Accesso per cavità profonde

Estremità piatta

Condensatore

Bordi semi-arrotondati

Formazione della pendenza
Eliminazione degli eccessi
Rimozione dei margini

Area di sicurezza bulk-fill di 4-5 mm


Sonda per materiali bulk-fill

Profilo rastremato

Eliminazione di eccessi di piccola entità
Modellazione dell'inclinazione
Anatomia secondaria

Punta affilata

Modellazione di precisione
Micromodellazione
Contrassegno dei limiti
Scratching
Distribuzione del flusso
Eliminazione delle bolle

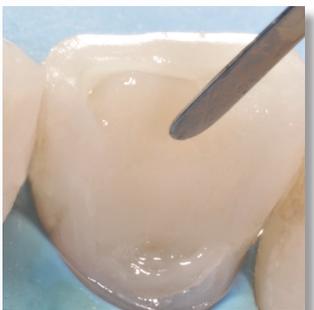

ELASTICITÀ E PRECISIONE LM-Arte™ Applica

Una spatola molto sottile e flessibile, progettata per l'applicazione e la modellazione estetica del composito. L'estremità di lavoro flessibile scolpisce delicatamente e con precisione gli strati di composito, consentendo di ricreare la naturale forma del dente. La punta sottile consente la modellazione in spazi ristretti o a contatto con la lamina della matrice.



APPLICA CON UN TWIST LM-Arte™ Applica Twist

Spatola per la modellazione del composito particolarmente sottile, flessibile e stretta. Grazie ad Applica Twist la modellazione degli spazi approssimali e delle creste marginali diventa estremamente semplice: le sue estremità ricurve permettono di raggiungere aree difficili senza complicare inutilmente la posizione di lavoro della mano.



MODELLA CON FLESSIBILITÀ LM-Arte™ Modella

Spatola particolarmente larga e sottile destinata alla modellazione del composito. Adatta soprattutto a superfici dentarie ampie, come le facce vestibolari degli incisivi. La sua estremità larga permette di stendere efficacemente il composito. Flessibilità, sensibilità e nettezza della punta aiutano a creare precisi dettagli estetici. La spatola è utile anche per prelevare il composito dalla siringa.





CONDENSA DELICATAMENTE

LM-Arte™ Condensa

Un condensatore lungo e arrotondato, specificamente progettato per la modellazione del composito. I suoi gambi angolati consentono l'accesso a qualsiasi tipo di cavità. Condensa ha un terminale spesso e uno sottile utilizzabili in cavità di diverse dimensioni, nei quadranti anteriori e posteriori. Le estremità arrotondate permettono una condensazione delicata senza rischio di adesione allo strumento.



LO SPAZIO NECESSARIO

LM-Arte™ Misura

Uno strumento unico per la misurazione orizzontale e verticale dello spessore degli strati del composito nei restauri anteriori. Dopo aver posizionato lo strato di dentina, prima di polimerizzare si pone l'estremità sottile a forma cilindrica a contatto con lo smalto naturale del dente. In questo modo, il composito residuo non polimerizzato che resta sotto la punta cilindrica può essere delicatamente modellato, lasciando lo spazio ottimale per lo strato di smalto in composito. La punta più spessa e corta di Misura invece va posizionata orizzontalmente sul margine della cavità preparata, in modo che il bordo della punta rimanga sullo smalto originale. Questo permette di determinare la giusta quantità di composito trasparente da applicare sulla linea di finitura. Il risultato? Un restauro estetico finale con la giusta calibratura di masse opache e traslucide, evitando il fastidioso effetto grigio dei compositi.





MISURA E MODELLA LM-Arte™ Posterior Misura

Versione posteriore del celebre strumento Misura. Progettato per la misurazione verticale dello spessore degli strati di composito sui restauri posteriori. La punta a forchetta dello strumento consente di modellare la parete prossimale, copiando l'altezza e l'anatomia del dente vicino, in presenza di una matrice.



NOVITÀ!

PRECISA VALUTAZIONE LM-Arte™ Cusp Misura

Strumento unico per misurare spessore e altezza della cuspidè al fine di valutare la necessità di una sua preparazione durante l'esecuzione di restauri adesivi. Ideale per valutare la resistenza della struttura del dente naturale e scegliere la tecnica restaurativa da utilizzare. Se la punta dello strumento a forchetta penetra fino ai relativi contrassegni, significa che la struttura del dente è troppo debole per sopportare le forze occlusali con un restauro diretto ed è necessario prendere in considerazione altre opzioni cliniche.





SCOLPIRE CAPOLAVORI

LM-Arte™ Fissura


Uno strumento di modellazione con punte estremamente affilate. L'estremità conica è progettata per scolpire, con un unico strumento, l'anatomia dell'area oclusale dei denti posteriori. La sottile punta a forma di sonda è ideale per la modellazione di solchi e lobi, nonché per la stratificazione di compositi di caratterizzazione e sigillanti. La flessibilità di Fissura permette un'esplorazione delicata e l'identificazione di possibili eccessi di resina sulla superficie dei denti ricostruiti.



ELIMINARE GLI ECCESSI

LM-Arte™ Eccesso

Uno strumento concepito per l'eliminazione dei residui di composito e bonding. Le speciali estremità di lavoro angolate di Eccesso sono ideali per la rimozione degli eccessi nelle zone cervicali anteriori e interprossimali dei molari. Questo strumento rigido e sottile si caratterizza per l'ottimale lunghezza, larghezza e spessore della lama.

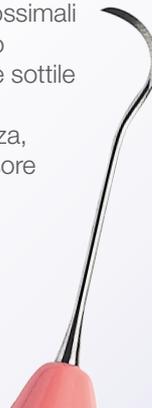

Per casi clinici di conservativa con strumenti LM™, visitare il sito web di Styleitaliano™ all'indirizzo www.styleitaliano.org



ELIMINARE LE DIFFICOLTÀ DELLA RETRAZIONE GENGIVALE CON LMGengiva™

Lo scopo del trattamento restaurativo di una lesione cervicale è quello di ottenere una perfetta sigillatura dei margini, una forte adesione e una lucidatura ottimale del composito. La retrazione gengivale meccanica nei restauri cervicali può essere traumatica se non effettuata correttamente.

Lo strumento LM-Gengiva™ con i retrattori gengivali viene utilizzato per evitare inutili lesioni della gengiva e ottenere il risultato clinico migliore. Questo metodo permette di conseguire il risultato finale desiderato: il tessuto molle non viene danneggiato e i requisiti estetici sono soddisfatti.



LM-Gengiva™ Kit di retrazione gengivale

LMErgoSense® LM 7556K ES

LMErgoMax™ LM 7556K XSI

Incl. lo strumento manuale LM-Gengiva™, retrattori gengivali blu (assortimento di circa 90 pz., 30 pz./misura) e LM-MultiLever™ per rimuovere le estremità di lavoro in plastica



RETRATTORI GENGIVALI

- allontanano la gengiva dal restauro
- la durezza della punta in plastica permette una forte retrazione
- le punte in plastica consentono una certa flessibilità per un maggiore adattamento durante l'applicazione della pressione
- la punta agisce in modo da fornire una sigillatura ermetica tra gengiva e dente
- proteggono la gengiva e riducono il rischio di collasso per distacco
- l'interfaccia di adesione e il margine gengivale sono perfettamente visibili, in perfetto contrasto con i tessuti molli
- possibilità di personalizzazione con la fresa per l'adattamento a superfici radicolari convesse o concave
- gli adesivi non si incollano alla superficie delle punte
- non interferiscono con la polimerizzazione
- monouso

LM Dental™

LM-Instruments Oy

Norrbyn rantatie 8 | FI-21600 Parainen | Finlandia

Tel. +358 2 4546 400

info@lm-dental.com | www.lm-dental.com

Dove acquistare?
Contattate il vostro distributore locale!